



oïdo 

Guide d'utilisation Oïdo - Chargeur

Une gamme d'aides auditives nouvelle génération
sélectionnée et distribuée par Audition Conseil



**AUDITION
CONSEIL**

www.auditionconseil.fr

Sommaire

Votre chargeur 5

Utilisation prévue 6

Remarques importantes 7

Remarques concernant les piles 8


Utilisation du chargeur 9

Conseils utiles relatifs à la charge 12


Maintenance et entretien 13

Informations relatives à la mise au rebut
du produit 14


Votre chargeur

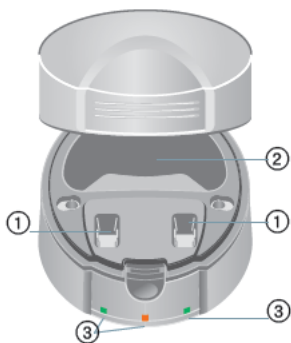

- ① Emplacements de charge avec contacts de charge.
- ② Compartiment pour unités réceptrices, LifeTubes et dômes.
- ③ LED indiquant l'état de fonctionnement du chargeur.

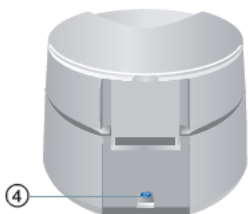

- ④ Contact pour alimentation.

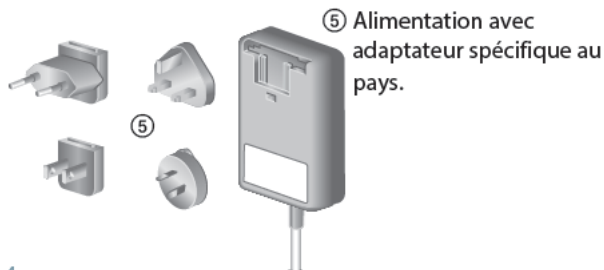

- ⑤ Alimentation avec adaptateur spécifique au pays.

Utilisation prévue

Ce chargeur est destiné à recharger des aides auditives.

Lisez et observez les instructions de ce guide d'utilisation afin d'éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de votre chargeur et de vos aides auditives.

FR

Symboles :

Soyez attentif aux informations signalées par les symboles **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION** ou **REMARQUE** !



AVERTISSEMENT indique une situation pouvant entraîner des blessures graves,

ATTENTION indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures à modérées.

REMARQUE

REMARQUE indique un risque d'endommagement du matériel.



Conseils et astuces pour une meilleure utilisation de votre chargeur.



Instructions. Indique qu'une action doit être effectuée.

Remarques importantes

- i** ▶ N'exposez pas le chargeur à des températures extrêmes ou à une forte humidité.
- ▶ Ne l'exposez pas au rayonnement direct du soleil.

AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement par les petites pièces.

- ▶ Tenez les piles et les aides auditives hors de portée des enfants.
- ▶ En cas d'ingestion, consultez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital.

AVERTISSEMENT

Risque de blessures causées par un choc électrique !

- ▶ Ne touchez pas les contacts de charge situés dans le chargeur.
- ▶ Si un nettoyage est nécessaire, débranchez le chargeur du secteur.

ATTENTION


Risque de dysfonctionnement dû à des éléments incompatibles.

- ▶ Utilisez uniquement l'alimentation secteur et l'adaptateur spécifique au pays fourni avec le chargeur.

- i** ■ Ce produit n'est pas doté d'un interrupteur d'alimentation. Il est sous tension lorsque le cordon d'alimentation est branché.
- Le chargeur doit être uniquement utilisé en intérieur.

Remarques concernant les piles

- ▶ Utilisez uniquement des piles rechargeables fournies par votre audioprothésiste.
- ▶ Pour plus d'informations sur la taille des piles, consultez le guide d'utilisation de vos aides auditives.
- ▶ Veillez à insérer correctement les piles rechargeables.
- ▶ Chargez la pile rechargeable avant la première utilisation.

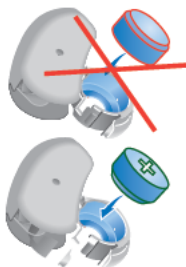

REMARQUE

Les piles contiennent des substances nocives et polluantes pour l'environnement.

- ▶ Ne jetez pas vos piles ou batteries usagées avec les ordures ménagères.
- ▶ Pour une élimination respectueuse de l'environnement, rapportez-les à votre audioprothésiste.

FR

Utilisation du chargeur

Préparation

- ▶ Raccordez le chargeur à l'alimentation secteur.

Mise en charge

- ▶ Appuyez sur le bouton à l'avant pour ouvrir le chargeur.
- ▶ Le couvercle se déverrouille.
- ▶ Placez vos aides auditives dans les emplacements de charge.
- ▶ Fermez le couvercle du chargeur.
- ▶ Vos aides auditives s'éteignent automatiquement et le processus de charge débute. La LED verte clignote.



La charge est complète lorsque la LED verte reste allumée en continu.

- ▶ Sortez vos aides auditives du chargeur lorsque vous souhaitez les utiliser à nouveau.
- ▶ Vérifiez que vos aides auditives sont allumées.





Utilisation du chargeur

Les voyants LED du chargeur indiquent l'état de charge.










LED du milieu : Raccordement à l'alimentation secteur

LED gauche / droite : Processus de charge de l'aide auditive gauche / droite

LED et état	Explication
LED du milieu vert constant 	Chargeur sous tension. Le chargeur est prêt à fonctionner.
LED du milieu éteinte 	■ Vérifiez que le chargeur est raccordé à l'alimentation appropriée.
LED gauche / droite vert clignotant 	Le processus de charge de l'aide auditive gauche / droite est en cours. ■ Laissez l'aide auditive dans le chargeur.
LED gauche / droite vert constant 	Le processus de charge de l'aide auditive gauche/droite est terminé. Le chargeur préserve la charge de la pile. ■ Sortez vos aides auditives du chargeur lorsque vous souhaitez les utiliser.

Utilisation du chargeur

LED et état	Explication
<p>LED gauche et droite rouge constant</p> 	<p>Insert inadapté dans le chargeur. La charge n'a pas pu débiter.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mettez en place l'insert adapté à vos aides auditives ou faites-le mettre en place par votre audio-prothésiste.
<p>LED gauche / droite rouge constant</p>  	<p>Polarité incorrecte de la pile dans l'aide auditive gauche / droite.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez la polarité des piles.■ Vérifiez que les aides auditives sont correctement insérées dans les emplacements de charge.
<p>LED gauche / droite rouge clignotant</p>   	<p>Pile incorrecte dans l'aide auditive gauche / droite. Le processus de charge n'a pas pu débiter.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vérifiez le type des piles.

LED et état	Explication
	<p>Si le type et la polarité des piles sont corrects, mais qu'une des LED est allumée en rouge :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Faites nettoyer les contacts des aides auditives et du chargeur par votre audioprothésiste. ■ Faites vérifier l'état de fonctionnement des piles rechargeables et du chargeur par votre audioprothésiste.
<p>LED gauche / droite orange clignotant</p> 	<p>Température extérieure trop élevée. Le processus de charge est interrompu pour préserver le fonctionnement des piles rechargeables. La charge reprend quand la température extérieure descend sous 45°C (113°F).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez le chargeur dans un endroit plus frais.

Pour toute question, n'hésitez pas à prendre contact avec votre audioprothésiste.

Conseils utiles relatifs à la charge

- ▶ Portez vos aides auditives pendant une journée complète.
- ▶ Rechargez les piles rechargeables pendant la nuit.

Un cycle de charge dure environ 6 heures.

Si vous interrompez un cycle de charge (en ouvrant le couvercle du chargeur, par exemple), un nouveau cycle débute.

i Si vous devez retirer les aides auditives avant la fin du cycle de charge, leur durée d'utilisation sera plus courte que la durée habituelle.

Pour optimiser la durée de vie de vos piles rechargeables :

- ▶ Évitez d'interrompre un cycle de charge.
- ▶ Lorsque vos aides auditives sont entièrement chargées mais que vous ne souhaitez pas les utiliser tout de suite, laissez-les dans le chargeur.
- ▶ Évitez de recharger avant un minimum de 5 heures d'utilisation.
- ▶ Retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser vos aides auditives pendant plusieurs jours.

FR

Maintenance et entretien

REMARQUE

Le chargeur peut être endommagé par du dissolvant.

- ▶ Ne stérilisez pas ou ne désinfectez pas le chargeur.
- ▶ Nettoyez le chargeur à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- ▶ Adressez-vous à votre audioprothésiste si les contacts de charge nécessitent d'être nettoyés.

Fonction d'assèchement

- ▶ Placez une capsule asséchante dans le support situé à l'intérieur du couvercle du chargeur.
- ▶ Autant que possible, laissez le couvercle du chargeur fermé afin de prolonger la durée de vie de la capsule asséchante.
- ▶ Remplacez la capsule asséchante lorsque son contenu devient jaune pâle.



ATTENTION

Risque d'empoisonnement en cas d'ingestion du contenu de la capsule asséchante.

- ▶ Tenez la capsule asséchante hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consultez un médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital.

Informations relatives à la mise au rebut du produit

Au sein de l'Union européenne, les équipements portant ce symbole relèvent de la "Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, modifiée par la Directive 2003/108/CE" (DEEE).



► Recyclez le chargeur conformément aux réglementations nationales.

FR

www.siemens.com/hearing

Par le marquage CE, Siemens certifie la conformité du produit avec la directive européenne 2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique.







**AUDITION
CONSEIL**

www.auditionconseil.fr

oïdo

Une gamme d'aides auditives nouvelle génération
sélectionnée et distribuée par Audition Conseil.

REXTON

www.rexton.com

Rexton une est marque de
Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
91058 Erlangen
Germany
Phone +49 9131 308 0